


UTILIZAÇÃO DO ACESSÓRIO

Pode ser ajustado, tanto na altura quanto em relação ao posicionamento das conchas, através do parafuso lateral, conforme apresentado na imagem a seguir:

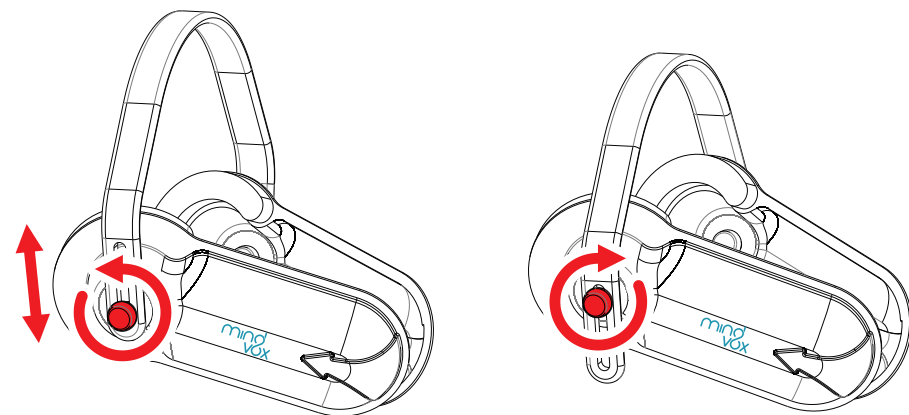

A equipe **MindVox** deseja a todos bons estudos e excelentes resultados!

Facilite Voice - Fabricação de Instrumentos Musicais Eireli

41 3023-0707 | contato@facilitevoice.com.br



www.facilitevoice.com.br



@mindvox_retorno_vocal



@mindvox.mindvox

MANUAL DE USO



mind VOX

Parabéns pela aquisição do seu **MindVox**, um acessório especialmente desenvolvido para facilitar a vida do cantor, como também a reabilitação e habilitação vocal!



RETORNO VOCAL

O **MindVox** é um dispositivo que funciona como um retorno ou um monitor individual acústico e auxilia o usuário no seu processo de treinamento técnico-vocal, uma vez que maximizando o desenvolvimento da acuidade auditiva, leva ao usuário à conscientização da voz que realmente produz "na fonte", sem mascaramentos.

O acessório faz com que a voz retorne imediatamente aos ouvidos do usuário enquanto ele a produz, levando-o a um melhor controle de sua voz, de modo a não apenas minimizar os excessos de pressão psicoacústica (que segundo as modernas ciências da voz, podem causar danos aos músculos laríngeos), mas também melhor explorar as inúmeras nuances e inflexões vocais presentes no canto contemporâneo, enriquecendo as possibilidades de expressão e interpretação vocal.

O **MindVox** pode ser utilizado, tanto por cantores de todas as idades, no seu processo de treinamento técnico-vocal, quanto por pacientes fonoaudiológicos, no seu processo de reeducação vocal.

A única contraindicação do equipamento é seu uso para treinamento de cantores líricos, uma vez que o estilo e a técnica exigem maior projeção e intensidade vocal. E o uso do **MindVox** induz exatamente à uma redução significativa de tais elementos técnico-vocais.

A ferramenta ou dispositivo foi criado sem nenhuma tecnologia eletroeletrônica e seu objetivo é proporcionar o monitoramento auditivo da voz, por meio do retorno imediato da própria voz, visto a audição ser fator determinante na qualidade e controle da emissão vocal.

mind
VOX



REABILITAÇÃO VOCAL

O **MindVox** pode também ser utilizado na habilitação e reabilitação vocal, em especial, naqueles casos em que as alterações do comportamento vocal estão envolvidas na base de uma disfonia ou no ajuste vocal inadequado, em situações de uso profissional da voz, na fala e no canto.

Seus objetivos na terapia e treinamento vocal visam especialmente:

- ❖ Promover o monitoramento auditivo da própria voz;
- ❖ Desenvolver a conscientização vocal;
- ❖ Contribuir para o controle da intensidade vocal elevada, na voz profissional falada e cantada;
- ❖ Auxiliar na redução do excesso de tensão fonatória;
- ❖ Monitorar ajustes articulatórios.

Sua utilização pode ser aplicada nos seguintes casos:

- ❖ Disfonia por tensão muscular;
- ❖ Disfonias por uso de intensidade vocal elevada;
- ❖ Disfonias neurológicas;
- ❖ Treinamento para uso profissional da voz falada (professores, operadores de *telemarketing*, repórteres, políticos, executivos, etc.);
- ❖ Treinamento das habilidades vocais na voz cantada;
- ❖ Monitoramento auditivo da produção vocal.

O **MindVox** é um dispositivo de uso **individual**, não se tratando de um instrumento médico ou um aparelho auditivo fonoaudiológico, mas sim, de uma ferramenta de auxílio em **terapias e treinamento vocal**; contudo, para alcançar melhores resultados, sugere-se o acompanhamento e indicação de profissionais especializados.

Para higienização de seu acessório, utilize sabão ou detergente neutro, aplicando com o uso uma esponja macia para evitar riscos ao acessório, realize o enxague com água potável e, após esse procedimento e secagem, com o uso de uma toalha macia proceda a fricção com álcool 70%.

mind
VOX