


UTILIZACIÓN DEL ACCESORIO

Puede ser ajustado, tanto en la altura como en relación al posicionamiento de los auricular acústico, a través del tornillo lateral, conforme es presentado en la siguiente imagen:

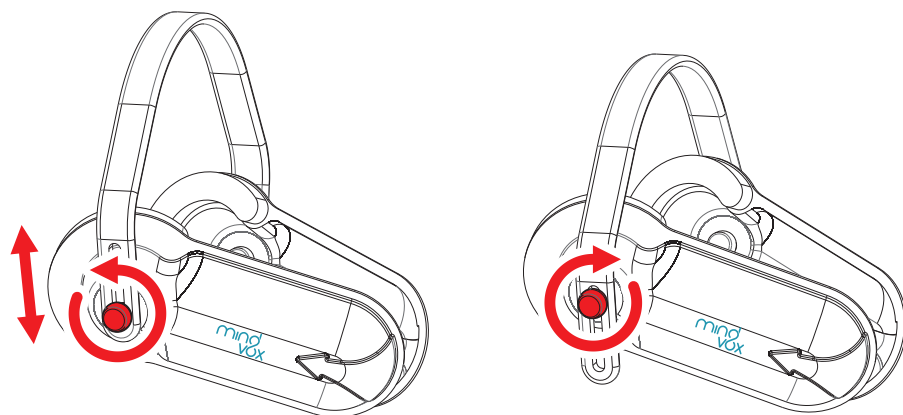

¡El equipo **MindVox** desea a todos excelentes estudios y aún mejores resultados!

Facilite Voice - Fabricação de Instrumentos Musicais Eireli

41 3023-0707 | contato@facilitevoice.com.br



www.facilitevoice.com.br

@mindvoxoficial

@mindvox.mindvox

MANUAL DE USO



mind
vox

Felicitaciones por la adquisición de su **MindVox**, un accesorio especialmente desarrollado para facilitar la vida del cantante, también la rehabilitación y habilitación vocal!



RETORNO VOCAL

MindVox es un dispositivo que funciona como un retorno o un monitor individual acústico y auxilia al usuario en su proceso de entrenamiento técnico-vocal, puesto que, maximizando el desarrollo de la acuidad auditiva, lleva el usuario a la concientización de la voz que realmente produce "en la fuente", sin enmascaramientos.

El accesorio hace que la voz retorne inmediatamente a los oídos del usuario mientras este la produce, llevándolo a un mejor control de su voz, de modo a no solo minimizar los excesos de presión psicoacústica (que, según las ciencias modernas de la voz, pueden causar daños a los músculos laríngeos), sino también explotar mejor los innumerables matices e inflexiones vocales presentes en el canto contemporáneo, enriqueciendo las posibilidades de expresión e interpretación vocal.

MindVox puede ser utilizado, tanto por cantantes de todas las edades, en su proceso de entrenamiento técnico-vocal, como por pacientes fonoaudiológicos, en su proceso de reeducación vocal.

La única contraindicación del equipamiento es su uso para entrenamiento de cantantes líricos, dado que el estilo y la técnica exigen mayor proyección e intensidad vocal. Y el uso de **MindVox** induce exactamente a una reducción significativa de tales elementos técnico-vocales.

La herramienta o dispositivo fue creado sin ninguna tecnología eléctrica o electrónica y su objetivo es permitir el monitoreo auditivo de la voz, por medio del retorno inmediato de la propia voz, visto que la audición es un factor determinante en la calidad y control de la emisión vocal.

mind
vox



REHABILITACIÓN VOCAL

MindVox puede también ser utilizado en la habilitación y rehabilitación vocal, en especial, en aquellos casos en que las alteraciones del comportamiento vocal están involucradas en la base de una disfonía o en el ajuste vocal inadecuado, en situaciones de uso profesional de la voz, en el habla y en el canto.

Sus objetivos en la terapia y entrenamiento vocal apuntan especialmente a:

- ❖ Promover el monitoreo auditivo de la propia voz;
- ❖ Desarrollar la concientización vocal;
- ❖ Contribuir para el control de la intensidad vocal elevada, en la voz profesional hablada y cantada;
- ❖ Auxiliar en la reducción del exceso de tensión fonatoria;
- ❖ Monitorear ajustes articulatorios.

Su utilización puede ser aplicada en los siguientes casos:

- ❖ Disfonía por tensión muscular;
- ❖ Disfonías por uso de intensidad vocal elevada;
- ❖ Disfonías neurológicas;
- ❖ Entrenamiento para uso profesional de la voz hablada (profesores, operadores de telemarketing, reporteros, políticos, ejecutivos, etc.);
- ❖ Entrenamiento de las habilidades vocales en la voz cantada;
- ❖ Monitoreo auditivo de la producción vocal.

MindVox es un dispositivo de uso individual. No se trata de un instrumento médico o un aparato auditivo fonoaudiológico, sino de una herramienta de auxilio en terapias y entrenamiento vocal. Sin embargo, para alcanzar mejores resultados, se sugiere el seguimiento y la indicación de profesionales especializados.

Para la higienización de su accesorio utilizar jabón o detergente neutro, aplicándolo con el uso de una esponja suave para evitar rallarlo. Enjuagarlo con agua potable y, después de ese procedimiento y secado, con el uso de una toalla suave proceda a la fricción con alcohol 70%.

mind
vox